

公告序號：2025-059

公告編碼：20251103-01

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2025 年 11 月 03 日

公告事項：TNF- α (α 型腫瘤壞死因子)更換儀器

說明：

自 2025 年 11 月 17 日起，檢驗項目 TNF- α (α 型腫瘤壞死因子)更換儀器，變更後內容如下：

	原儀器	新儀器
廠牌	Immulite 1000	Immulite 2000
原理	Chemiluminescent Immunoassay(CLIA)化學發光免疫分析法	
檢體種類	血清 Serum 3.0mL	
檢體保存	冷藏 2-8°C 可保存 2 天 冷凍 -20°C 可保存 6 個月	冷藏 2-8°C 可保存 2 天 冷凍 -20°C 可保存 6 個月
報告說明	< 8.1 pg/mL	<13.7pg/mL
注意事項	Icterus : Bilirubin 200mg/dL 以下不受影響； Hemolysis : Hemoglobin 381mg/dL 以下不受影響； Lipemia : Triglyceride 3000mg/dL 以下不受影響	Bilirubin: conjugated bilirubin 30 mg/dL 以下、 unconjugated bilirubin 40 mg/dL 以下不受影響； Hemolysis : Hemoglobin 250 mg/dL 以下不受影響； Lipemia : Intralipid 2000mg/dL 以下不受影響 Biotin: 含 Biotin 3500 ng/mL 的樣本，結果變化小於或等於 10%。Biotin 高於此濃度可能導致患者樣本的結果不正確。

備註：採檢手冊 2025 年_第 323 頁

(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

特此告知造成不便敬請見諒！

承辦人員：技術主管 張婉亘 分機 1102
品質主管 余佩玲 分機 1402

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所
JY01010089