

公告序號：2026-055

公告編碼：20260810-01

受 文 者：貴 單位主管鈞鑒

日 期：2026 年 08 月 10 日

公告事項：檢驗項目 EBV VCA IgG 與 EPO 變更檢驗說明

說 明：自 2026 年 09 月 07 日起，EBV-VCA IgG 與 EPO 變更檢驗說明如下：

	變更前	變更後
英文名稱	EBV-VCA-IgG	EBV VCA IgG
中文名稱	EB 病毒囊鞘 IgG 抗體	EB 病毒殼 IgG 抗體
健保編號	14046B	
健保點數	540	
定價	540	
院內碼	EBG.	EBGB
檢體採集	避免使用溶血、脂血、黃疸的檢體。 血清採血前不需空腹。冷藏可於 2-8℃儲存 7 天，於-20℃可保存 6 個 月。	避免使用溶血、脂血、黃疸及污染的檢 體。檢體可在 2-8℃保存 3 天，於-20℃ 可保存 6 個月。Asfotase alfa (STRENSIQ®) 藥物會干擾檢驗結果。
檢體種類	血清 0.5mL	
容器	2；3；4	
運送條件	冷藏<15℃	
臨床意義	病人感染 EB 病毒，在急性期產生 IgG 抗體後體內即終身存在低效價 的抗體。高效價的 VCA-IgG 常見於 Burkitt's lymphoma，鼻咽癌及免疫控 制的病人。	EB 病毒是傳染性單核球增多症 (IM) 的典型原因，並與 African Burkitt 淋 巴瘤、鼻咽癌、何杰金氏病 (Hodgkin's disease) 等多種人類腫瘤密切相關。 VCA IgG 抗體在急性感染期通常會達 到高峰，隨後在體內終身維持穩定水平。
分析方法	CLIA 化學發光酵素免疫分析法	Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)；Immulite 2000XPi，SIEMENS
報告說明	≤0.90(-)；0.91-1.09 (±)；≥1.1(+)	<0.90(-)；≥0.90-<1.10 (+/-)；≥1.10(+)
報告時效	4 工作日	
檢驗單位	高雄立人醫事檢驗所	立人醫事檢驗所(台北)
注意事項		

**受影響之報告與檢體：自 2026 年 09 月 04 日起本所受理之檢體。

備註：採檢手冊 2025 年_第 62 頁 (查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

	變更前	變更後
英文名稱	Erythropoietin；EPO	
中文名稱	紅血球生成因子檢驗	紅血球生成素
健保編號	27077B	
健保點數	300	
定價	900	

院內碼	EPO	EPOB
檢體採集	血清或血漿(Heparinized plasma) 0.5mL(或全血 1.5mL)、不能使用 EDTA 作抗凝劑。建議採檢時間早上 07:30-12:00。檢體可在 2-8℃ 保存 7 天，在-20℃ 保存 2 個月。	避免使用溶血及污染的檢體。建議採檢時間早上 07:30-12:00。檢體可在 2-8℃ 保存 7 天，於-20℃ 可保存 2 個月。若攝取高劑量生物(Biotin) 可能導致檢驗結果偽性偏低。Asfotase alfa (STRENSIQ®) 藥物會干擾檢驗結果。
檢體種類	血清 Serum 或血漿 Plasma(heparin) 1.5mL	血清 0.5mL
容器	2 ; 3 ; 4	
運送條件	冷藏<15℃	
臨床意義	EPO 上升於再生性不良貧血、異位性產生 EPO 腫瘤、ALL 及肝癌、腎癌、renal cysts、懷孕、缺氧等。下降於慢性腎衰竭、自體免疫疾病、Hodgkin' s、polycythemia rubra vera。EPO 是腎皮質 peritubular cell 產生的糖蛋白，當腎臟缺氧時釋出來刺激骨髓新生紅血球。早上的數據比下午高，晝間節率 diurnal rhythm。	
分析方法	Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) ; Immulite 2000XPi , SIEMENS	
報告說明	4.3-29.0 mIU/mL	
報告時效	9 工作日；每週五早上操作	4 工作日
檢驗單位	大安聯合醫事檢驗所	立人醫事檢驗所(台北)
注意事項	檢體退件：溶血 4+ 本項目不適用健保點數收費	

**受影響之報告與檢體：自 2026 年 09 月 04 日起本所受理之檢體。

備註：採檢手冊 2025 年_第 168 頁 (查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：醫 檢 師 蘇秀娥 分機 1451
技術主管 張婉亘 分機 1102
品質主管 余佩玲 分機 1503

立人醫事檢驗所 敬上

立人醫事檢驗所
JY01010089