

公告編號:20210315-1

受文者:貴單位主管鈞鑒

日期:2021年03月15日

公告事項:自2021年4月1日起,因變更檢驗試劑 Insulin RIA 方法轉換為 ECLIA 方法。
說明:

	原方法	新方法
項目名稱	Insulin	Insulin
方法	RIA	ECLIA
廠牌	DIAsource	ROCHE
檢體要求	Serum / EDTA-Plasma	Serum / Plasma-EDTA、Heparin
檢體需求量	0.5 mL	0.5 mL
病人準備	1. 飯前:須空腹 8 小時。 2. 飯後:飯後 2 小時後。	1. 飯前:須空腹 8 小時。 2. 飯後:飯後 2 小時後。
檢體保存條件	檢體採集後需冷藏 2-8°C,可保存 1 天,超過 24 小時需-20°C 保存。	檢體採集後需冷藏 2-8°C,可保存 2 天,冷凍-20°C,可保存 6 個月;建議只可冷凍解凍 1 次。
量測區間	4-16 uIU/mL	0.4 - 1000 μU/mL
報告單位	uIU/mL	μU/mL
參考值	AC: 4-16 uIU/mL PC: 未提供	AC: 2.6 - 24.9 μU/mL (依原廠試劑說明書) PC: 未提供
操作時間/ 發報告日	周一、四早上做;當天發報告	每天操作;當天發報告

備註:QP-1802 採檢手冊 2018 年九月版 P.256 (Insulin AC; Insulin PC)

受影響之報告為:自 2021 年 04 月 01 日起所有送至本單位操作之檢體!!

特此告知 造成不便 敬請見諒!

承辦人員 :

核 醫 組 長 陳少薇 分機 1471
技 術 主 管 許哲豪 分機 1403
品 質 主 管 余佩玲 分機 1402
技 術 長 徐仁杰 分機 1401

立人醫事檢驗所
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上