

公告編號:2021083001

受文者:貴單位主管鈞鑒

日期:2021年08月30日

公告事項:自2021年9月1日起,項目:Anti-B2-Glycoprotein-I IgG、Anti-B2-Glycoprotein-I IgM、Anti-Cardiolipid IgG、Anti-Cardiolipid IgM 更換檢驗方法。

說明:

	原方法(委大安聯合)	新方法(自行操作)
項目名稱	Anti-B2-Glycoprotein-I IgG	<b>Anti-B2-Glycoprotein-I IgG</b>
方法	Multiplex flow immunoassay	<b>Chemiluminescent immunoassay</b>
廠牌	BioPlex™ 2200 APLS Screen	<b>BioFlash</b>
檢體要求	血清、血漿(Sodium Citrate)	<b>血清、血漿(Sodium Citrate)</b>
檢體需求量	0.5mL	<b>0.5mL</b>
病人準備	無	<b>無</b>
檢體保存條件	2-8°C可保存7天	<b>未於48小時內分析,存放於-20°C</b>
量測區間	未提供	<b>6.4-6100</b>
報告單位	U/mL	<b>CU</b>
參考值	Negative : < 20.0 , Positive : ≥ 20.0	<b>≤20.0(-) ; &gt;20.0(+)</b>
操作時間/發報告日	每日	<b>每日</b>

	原方法(委大安聯合)	新方法(自行操作)
項目名稱	Anti-B2-Glycoprotein-I IgM	<b>Anti-B2-Glycoprotein-I IgM</b>
方法	ELISA	<b>Chemiluminescent immunoassay</b>
廠牌	INOVA QUANTA Lite	<b>BioFlash</b>
檢體要求	血清、血漿(Sodium Citrate)	<b>血清、血漿(Sodium Citrate)</b>
檢體需求量	0.5mL	<b>0.5mL</b>
病人準備	無	<b>無</b>
檢體保存條件	2-8°C可保存7天	<b>未於48小時內分析,存放於-20°C</b>
量測區間	未提供	<b>1.1-841</b>
報告單位	SMU	<b>CU</b>
參考值	Negative : ≤ 20.0 , Positive : > 20.0	<b>≤20.0(-) ; &gt;20.0(+)</b>
操作時間/發報告日	每周二	<b>每日</b>

	原方法(委大安聯合)	新方法(自行操作)
項目名稱	Anti-Cardiolipin IgG	Anti-Cardiolipin IgG
方法	Multiplex flow immunoassay	Chemiluminescent immunoassay
廠牌	BioPlex™ 2200 APLS Screen	BioFlash
檢體要求	血清、血漿(Sodium Citrate)	血清、血漿(Sodium Citrate)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
病人準備	無	無
檢體保存條件	2-8°C 可保存 7 天	未於 48 小時內分析，存放於-20°C
量測區間	未提供	2.6-2024
報告單位	U/mL	CU
參考值	Negative : < 20.0 , Positive : ≥ 20.0	≤20.0(-) ; >20.0(+)
操作時間/發報告日	每日	每日

	原方法(委大安聯合)	新方法(自行操作)
項目名稱	Anti-Cardiolipin IgM	Anti-Cardiolipin IgM
方法	ELISA	Chemiluminescent immunoassay
廠牌	INOVA QUANTA Lite	BioFlash
檢體要求	血清、血漿(Sodium Citrate)	血清、血漿(Sodium Citrate)
檢體需求量	0.5mL	0.5mL
病人準備	無	無
檢體保存條件	2-8°C 可保存 7 天	未於 48 小時內分析，存放於-20°C
量測區間	未提供	1.0-774
報告單位	U/mL	CU
參考值	Negative : < 12.5 ; Indeterminate : ≥ 12.5 - ≤ 20.0 Positive : > 20.0	≤20.0(-) ; >20.0(+)
操作時間/發報告日	每日	每日

特此告知 造成不便 敬請見諒！

備註：QP-1802 採檢手冊 2021 年\_第 88、94 頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

承辦人員：

技術主管 許哲豪 分機 1403  
品質主管 余佩玲 分機 1402  
技術長 徐仁杰 分機 1401

立人醫事檢驗所  
 JY01010089
   
 立人醫事檢驗所 敬上