

公告編號:20211116-01

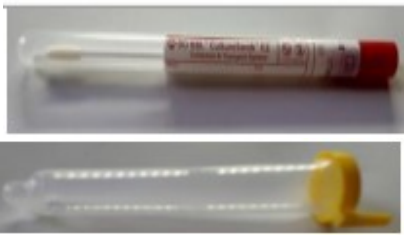

受 文 者:貴單位主管鈞鑒

日 期:2021 年 11 月 16 日

公告事項:自 2021 年 12 月 01 日起, HPV 採檢容器及報告說明變更。

說明:

1. 自 2021 年 12 月 01 日起, HPV 採檢容器變更為 HPV 專用管如下圖。

	變更前	變更後
採檢容器		
採檢步驟		<ol style="list-style-type: none"> 1. 撕開滅菌包裝袋, 並取出採檢抹片刷。 2. 將抹片刷置入陰道, 並緩緩旋轉 5-6 次後小心取出。 3. 打開運送保存管, 並將採檢抹片刷折斷於保存管內。 4. 蓋回帽蓋即可完成。
保存方式		存放於 4-10°C : 10 天

2. HPV 報告說明變更如下:

變更前	變更後
High Risk Genotype: 16.18.31.33.35.39.45.51.52.56.58.59.66.68.73.82	高危險型別: 16.18.31.33.35.39.45.51.52.56.58.59.68.73.82
Low Risk Genotype: 06.11.53.54.61.62.69.70.72.81.84	中低風險型別: 06.11.53.54.61.62.66.69.70.72.81.84。

特此告知 造成不便 敬請見諒!

備註: QP-1802 採檢手冊 2021 年_第 228 頁(查詢: <http://www.lez.com.tw/>)

承辦人員 :

分 生 組 長 賴孟君 分機 1406
技 術 主 管 張婉豆 分機 1102
技 術 長 徐仁杰 分機 1401



立人醫事檢驗所 敬上