

公告編號:2021121101

受 文 者:貴單位主管鈞鑒

日 期:2021 年 12 月 11 日

公告事項:

1. 自 2022 年 01 月 01 日起，因變更檢驗試劑 C-Peptide RIA 轉換為 ECLIA。

2. 自 2021 年 12 月 27 日起，因原廠檢驗試劑升級由 Anti-HAV 轉換為 Anti-HAV II

說明:

|           | 原方法                           | 新方法   |
|-----------|-------------------------------|---|
| 項目名稱      | C-Peptide                     | C-Peptide   |
| 方法        | RIA                           | ECLIA   |
| 廠牌        | CISBio                        | ROCHE   |
| 檢體要求      | Serum /Plasma-EDTA            | Serum / Plasma-EDTA、Heparin                       |
| 檢體需求量     | 0.5mL                         | 0.5mL   |
| 病人準備      | 無                             | 無   |
| 檢體保存條件    | 2-8°C可保存1天；未於24小時內分析，存放於-20°C | 需冷藏2-8°C，可保存1天，<br>冷凍-20°C，可保存1個月；<br>建議只可冷凍解凍1次。 |
| 量測區間      | 0.03-16.4 ng/mL               | 0.02-40 ng/mL                                     |
| 報告單位      | ng/mL                         | ng/mL   |
| 參考值       | 1.06 - 3.53 ng/mL             | 1.1 - 4.4 ng/mL(依試劑說明書)                           |
| 操作時間/發報告日 | 周一、四早上做;隔天發報告                 | 每天操作；當天發報告  |

|           | 原方法(定量方法)                                    | 新方法(定性方法)                   |
|-----------|--|-----------------------------|
| 項目名稱      | Anti-HAV                                     | Anti-HAV II                 |
| 方法        | ECLIA  | ECLIA                       |
| 廠牌        | Roche Cobas                                  | Roche Cobas                 |
| 檢體要求      | Serum  | Serum / Plasma-EDTA、Heparin |
| 檢體需求量     | 0.5mL  | 0.5mL                       |
| 病人準備      | 無  | 無                           |
| 檢體保存條件    | 2-8°C可保存14天                                  | 2-8°C可保存14天                 |
| 量測區間      | 4.0-60                                       | 無                           |
| 報告單位      | IU/L   | COI                         |
| 參考值       | Negative : $\leq 20.0$ , Positive : $> 20.0$ | $\leq 1.0(+)$ ; $> 1.0(-)$  |
| 操作時間/發報告日 | 每日   | 每日                          |

特此告知 造成不便 敬請見諒！

備註：QP-1802 採檢手冊 2021 年\_第 158、69 頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

承辦人員：技術主管 許哲豪 分機 1403

品質主管 余佩玲 分機 1402

立人醫事檢驗所  
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上