

公告編號：20220103-02

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2022年01月03日

公告事項：自2022年01月24日起，外送代檢項目 **Quantitation of kappa & lambda free light chain** 更換二次委外單位，該項目包含：**kappa free light chain**、**lambda free light chain**、**free kappa/ lambda ratio**。

	原方法	新方法
項目名稱	Quantitation of kappa & lambda free light chain	Quantitation of kappa & lambda free light chain
方法	比濁法	免疫比濁法
廠牌	Siemens	The Binding Site
檢體要求	Serum ; Urine	Serum ; Urine
檢體需求量	血清：3.0 mL； 尿液：5.0 mL	血清：1.5 mL； 尿液：3.0 mL
檢體保存條件	冷藏 2-8°C 可保存 2 天	冷藏 2-8°C，可保存 21 天
報告單位	mg/L	mg/L
量測區間	未提供	<b>Kappa：0.4 -1800 mg/L</b> <b>lambda：0.45 -1650 mg/L</b>
參考值	<b>Serum</b> kappa free light chain：3.30-19.40 mg/L lambda free light chain：5.71-26.30 mg/L <b>Urine</b> kappa free light chain：1.35-24.19 mg/L lambda free light chain：0.24-6.66 mg/L free kappa/lambda ratio：2.04 - 10.37	<b>Serum</b> kappa free light chain：3.30-19.40 mg/L lambda free light chain：5.71-26.30 mg/L free kappa/lambda ratio：0.26 – 1.65 <b>Urine</b> kappa free light chain：0.012-32.71 mg/L lambda free light chain：<0.45-4.99 mg/L
報告時效	8 天	每週三操作，當天發報告，如遇國定假日操作日順延一個工作天

**說明：**

備註：(1)每週一為收件截止日

(2)QP-1802 採檢手冊 2021 年\_第 317 頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：

行政副組長 徐瑋婷 分機 1532

技術長 徐仁杰 分機 1401

實驗室主管 湯麗玲 分機 1403

立人醫事檢驗所  
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上