

公告編號：20220207-01

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2022年02月07日

公告事項：依委外單位通知，自2022年02月07日起，項目 von Willebrand factor Ag;vWF:AG 操作單位變更並變更參考值。

	原方法	新方法
項目名稱	von Willebrand factor Ag;vWF:AG 類血友病因子, 溫韋伯氏因子	von Willebrand factor Ag, vWF:AG, vWF Activity 類血友病因子, 溫韋伯氏因子
方法	Turbidimetric	Immunoturbidimetric
廠牌	CA 7000, Sysmex	ACL TOP 700, Werfen
檢體要求	Na Citrate, 分裝血漿, 冷凍運送	2.7mL 3.2% Sodium citrate 1:9 全血的藍頭管, 採檢後倒轉試管混合10次, 立即離心1500 rcf(g)15分鐘以上, 分離血漿到空白管至少1 mL以上, 立即冷凍並冷凍送檢。 血液凝固相關的檢查, 都應先假設受檢者有血液凝固的障礙, 所以抽完血後請受檢者在抽血點至少加壓5分鐘以上, 以避免受檢者血流不止的危險。 因反覆冷凍解凍會影響檢體活性, 不建議原管複驗。 若病人需由靜脈留置針採血, 為避免檢體受到Heparin的干擾, 管路應先用5 mL生理食鹽水沖洗, 並丟棄前5 mL或6倍管路容積的血量, 再以藍頭採血管(Sodium citrate)採集所需的血量, 以防止上述干擾狀況的發生。
檢體需求量	1mL以上分離血漿	1mL以上分離血漿
病人準備	無	無
檢體保存條件	-20°C 冷凍	-20°C 冷凍
報告單位	%	%
量測區間	未提供	未提供
參考值	血型: O型: 40-122%; 其他血型: 61-153%	O: 48.0~140.8%, non O: 66.1~176.3%
報告時效	14天	每週六上午操作, 週一發報告

備註：(1)每週五為收件截止日

(2)QP-1802 採檢手冊 2021 年\_第 377 頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：

行政副組長 徐瑋婷 分機 1532

技術長 徐仁杰 分機 1401

實驗室主管 湯麗玲 分機 1403

立人醫事檢驗所  
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上