

公告編號：20220211-01

受文者：貴單位主管鈞鑒

日期：2022年02月11日

公告事項：1.自2022年03月01日起，ACTH變更檢驗試劑廠牌。

2.自2022年03月01日起，Intact-PTH變更檢驗試劑廠牌。

說明：

| | 原方法 | 新方法 |
|-----------|---|---|
| 項目名稱 | ACTH | ACTH |
| 方法 | RIA | ECLIA |
| 廠牌 | CIS | ROCHE |
| 檢體要求 | Plasma-EDTA | Plasma-EDTA |
| 檢體需求量 | 0.5mL | 0.5mL |
| 病人準備 | 無 | 1.採檢時間:早上 7-10 點抽血 2.抽血前 48 小時暫停使用含維生素 B7 (Biotin)保健食品。 |
| 檢體保存條件 | 檢體需以塑膠試管分裝送至冰凍櫃儲藏(-20°C)，在此狀態下，可維持穩定達 2 個月。 | 1.採血管(EDTA 紫頭管)需先放入冰箱預冷。 2.採血後立即低溫離心，在低溫下立即分裝血漿冷凍(-20°C)並於-20°C保存運送。 |
| 量測區間 | 2.00-1950 pg/mL | 1.5-2000 pg/mL |
| 參考值 | 10-60 pg/mL | 7.2-63.3 pg/mL(早上7-10點)(依試劑說明書) |
| 操作時間/發報告日 | 週二、五早上做;隔天發報告 | 每天操作；當天發報告 |

| | 原方法 | 新方法 |
|-----------|---|---|
| 項目名稱 | Intact-PTH | Intact-PTH |
| 方法 | RIA | ECLIA |
| 廠牌 | CIS | ROCHE |
| 檢體要求 | Serum / Plasma-EDTA | Serum / Plasma-EDTA、Heparin |
| 檢體需求量 | 0.5mL | 0.5mL |
| 病人準備 | 無 | 無 |
| 檢體保存條件 | 檢體需以塑膠試管分裝送至冰凍櫃儲藏(-20°C)，在此狀態下，可維持穩定達 2 個月。 | 血清：冷藏2-8°C，可保存2天 血漿：冷藏2-8°C，可保存3天 冷凍-20°C，可保存6個月；可冷凍解凍1次。 |
| 量測區間 | 0.70-1500 pg/mL | 1.2-5000 pg/mL |
| 參考值 | 11-62 pg/mL | 15-65 pg/mL(依試劑說明書) |
| 操作時間/發報告日 | 週二、五早上做;隔天發報告 | 每天操作；當天發報告 |

備註：QP-1802 採檢手冊 2021 年_第 29、251 頁(查詢：<http://www.lez.com.tw/>)

特此告知 造成不便 敬請見諒！

承辦人員：技術主管 許哲豪 分機 1403
品質主管 余佩玲 分機 1402
技術長 徐仁杰 分機 1401

立人醫事檢驗所
JY01010089

立人醫事檢驗所 敬上